

ООО «НПФ «Медтехника»
Носилки мягкие «НПФ-Медтехника»
ТУ 9451-002-38140643-2012

Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/1076 от 29.11.2021г.

ЭТИКЕТКА

1 Назначение и технические данные

- 1.1. Носилки мягкие «НПФ-Медтехника» (в дальнейшем – носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда обычными носилками воспользоваться неудобно или невозможно. В частности мягкие носилки могут использоваться при транспортировании людей по узким лестницам и извилистым проходам.
- 1.2. Основные размеры: длина 2100±50 мм, ширина 850±50 мм. Имеют четыре пары ручек.
- 1.3. Носилки выдерживают распределённый по площади груз массой 160 ± 5 кг.

2 Комплектность

- 2.1 В комплекты НМ-01, НМ-02 и НМ-03 входят: носилки мягкие – 1шт, сумка-чехол, этикетка – 1шт. По заказу покупателя носилки дополнительно комплектуются фиксирующими ремнями (исполнение НМ-02); фиксирующими ремнями и плечевыми ремнями для переноски пострадавшего в положении сидя (исполнение НМ-03).

3 Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция

- 3.1 Уложить транспортируемого человека на носилки.
- 3.2 Два или четыре человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.
- 3.3 Носилки изготовлены из материалов безопасных при контакте с открытыми участками кожи транспортируемых людей.
- 3.4 Обеззараживание рабочей поверхности носилок производится 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, типа «Лотос». Время дезинфицирующей выдержки – 60 минут. Обеззараживание производится из расчёта 700мл/ кв.м.
- 3.5 При видимых обильных загрязнениях носилок кровью - обеззараживание производится двукратным протиранием носилок двумя салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. После выдержки по п.3.4 дезинфицирующий раствор удаляется с поверхности носилок путём протирания салфеткой, смоченной водой. После чего носилки протираются сухой салфеткой.
- 3.6 Носилки могут подвергаться стирке в стиральной машине с использованием режимов стирки, определённых для синтетических тканей.

4 Срок эксплуатации

- 4.1 Средний срок службы носилок – 2 года.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации носилок -12 месяцев от даты продажи, но не более 18 месяцев от даты выпуска.
- 4.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.
- 4.4 Гарантийный ремонт осуществляется ООО «НПФ «Медтехника».

Изготовитель: ООО «НПФ «Медтехника», Россия, 198516, Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул. Фабричная, д.1, лит. А, оф.22
тел./факс (812) 612-06-71

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485
Исполнения: **НМ-01** **НМ-02** (с фиксирующими ремнями) **НМ-03** (с фиксирующими и плечевыми ремнями.)

Штамп ОТК _____

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____